



VOLNEWMER[®]

6.78MHz Monopolar RF

VOLNEWMER



VERDECKTE
KANTENSPIITZE

ABGERUNDETE
TIPS

RADIALE
RF-ENERGIE

KONTINUIERLICHE
WASSERKÜHLUNG

CLASSYS

VOLNEWMER

CDPSWISS
CLINICAL DISTRIBUTION PARTNER

Volnewmer – das sicherste nicht-invasive monopolare Radiofrequenzsystem für straffere, geliftete Haut. Durch die Kombination aus RF-Energie und innovativer Spitzentechnologie erleben Sie eine umfassende Hautbehandlung auf höchstem Niveau.

WAS VOLNEWMER IST

DIE KOMBINATION AUS BENÜTZERFREUNDLICHEM DESIGN UND TECHNOLOGIE FÜHRT ZU EINER DEUTLICHEN VERBESSERUNG DER BEHANDLUNG

VOLNEWMER ist die sicherste RF-Behandlungslösung für Hautstraffung, Hautfestigung und Konturierung durch Verjüngung. Es handelt sich um das fortschrittlichste und innovativste ästhetische System mit vier austauschbaren, einzigartigen Applikatoren, die mit einer abgerundeten Oberfläche ausgestattet sind, um die RF-Leistung und die Behandlungssicherheit zu maximieren.



Maximierte klinische Ergebnisse durch Technologie zur Unterdrückung von Nebenwirkungen und sichere Radiofrequenzenergie



Stabile und äußerst sichere radiale RF-Energie durch die gebogene Oberfläche und abgerundete Spitze



Radiale RF-Energie ermöglicht ein hohes Mass an Behandlungseffektivität




Kontinuierliche Wasserkühlung verhindert epidermale Verbrennungen und ermöglicht gleichzeitig die Abgabe einer hohen RF-Energie



1

VERDECKTES KANTEN-DESIGN DER SPITZE


Die Spitze ist nach innen ausgerichtet, um eine Energiekonzentration an den Spitzenkanten zu verhindern, eine sichere Energieübertragung zu gewährleisten und Nebenwirkungen zu minimieren.

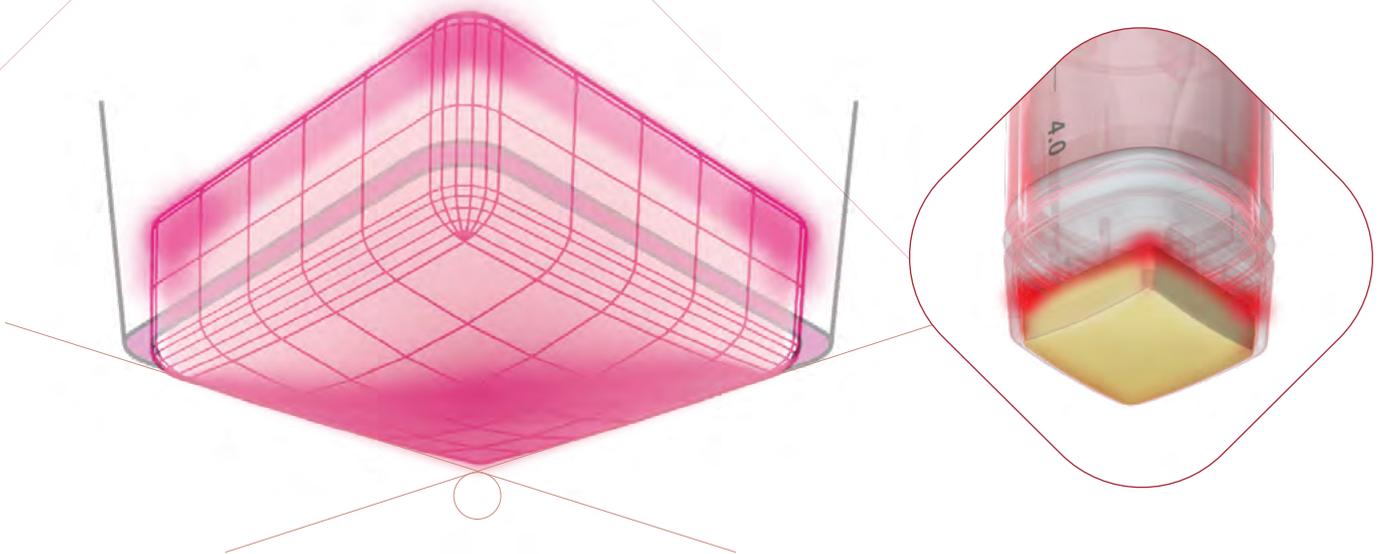


WENIGER SCHMERZEN UND MAXIMAL SICHERE RADIALE RF-ENERGIE DURCH DAS VERDECKTE SPITZENDESIGN

- Die Schmerzkontrolle ermöglicht ein höheres Behandlungsniveau mit besseren klinischen Ergebnissen.
- Ergonomisch geformte Spitzen für perfekten Kontakt mit der Haut zur Optimierung der RF-Energieabgabe.
- Gleichmäßige RF-Abgabe über die gesamte Oberfläche schützt die Epidermis vor Nebenwirkungen.


* Die RF-Energie bleibt bis zu 60 Sekunden lang auf dem gleichen Niveau konstant.

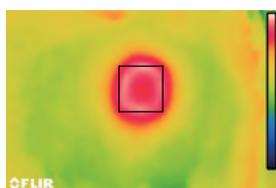


Nach 15 Sekunden

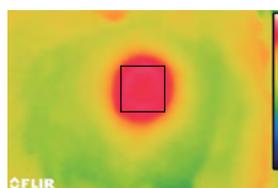


Nach 30 Sekunden

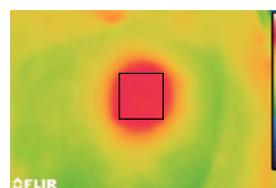

Nach 45 Sekunden

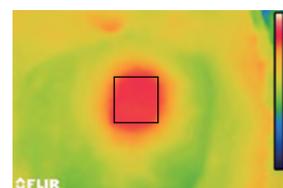

Nach 60 Sekunden

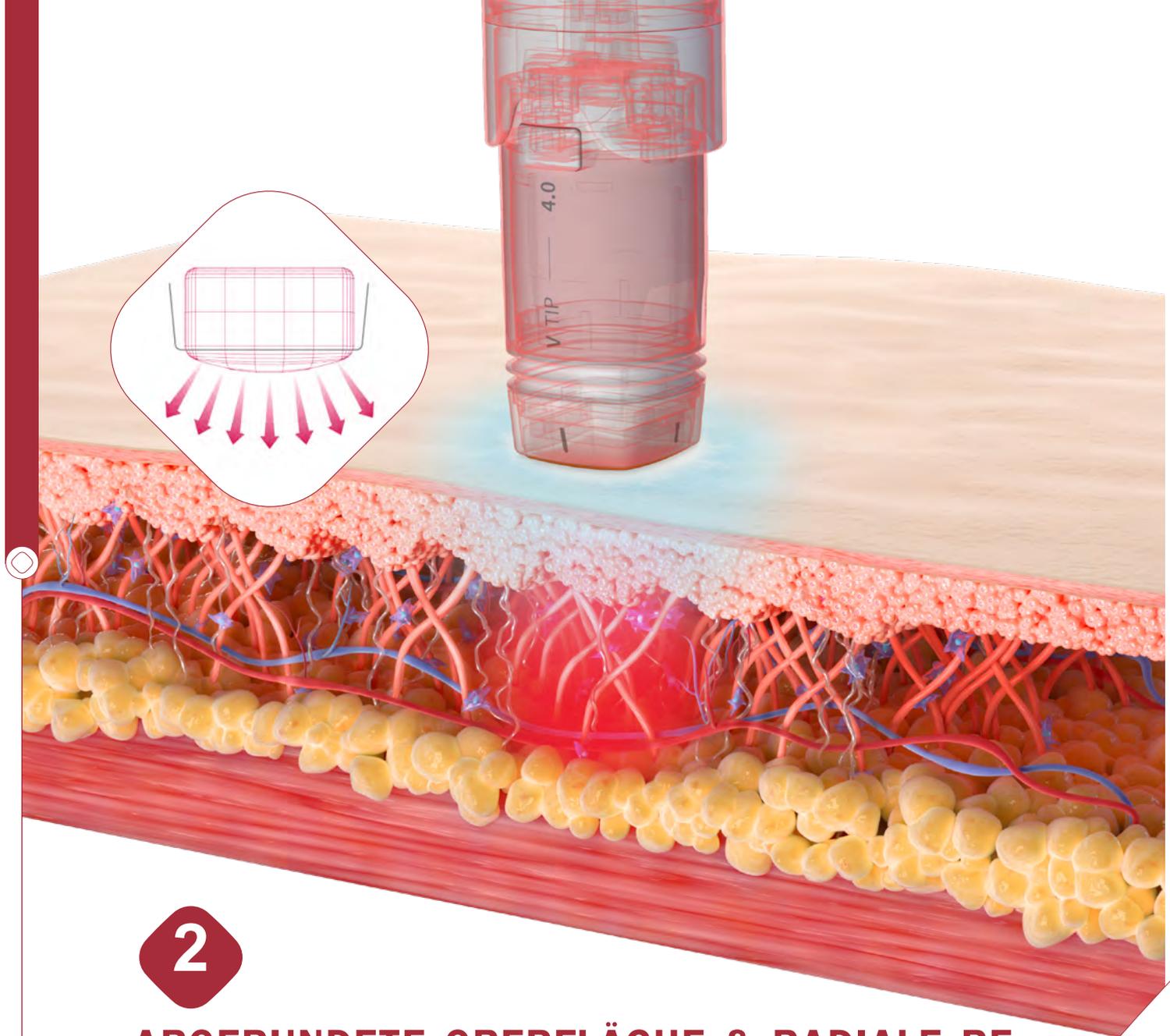

2

ABGERUNDETE OBERFLÄCHE & RADIALE RF-ENERGIE

Die RF-Energie wird durch ergonomisch geformte Spitzen gleichmäßig an die Dermis abgegeben. Die gewölbte Oberfläche der Spitze sorgt für einen perfekten Hautkontakt. Die RF-Wärmeenergie von VOLNEWMER wird radial verteilt, wodurch eine Behandlung auf hohem Niveau ermöglicht wird.


KOLLAGENRESTRUKTURIERUNG UND -REGENERATION DURCH ÜBERLAPPENDE ENERGIE

- RF-Energie erneuert das Kollagen, stärkt die Hautbarriere, verbessert die Elastizität und strafft die Haut.
- Beschleunigt die Kollagenregeneration und unterstützt die Verbesserung der extrazellulären Matrix (ECM).

3


KONTINUIERLICHES WASSERKÜHLSYSTEM

VOLNEWMER verwendet eine stabile Hochfrequenz-Ausgangstechnologie, um die Energieübertragung effizient zu steigern und Schmerzen sowie Nebenwirkungen zu reduzieren, indem pro REP ein einzelner Energieimpuls statt mehrerer Impulse abgegeben wird. Das Gerät verfügt außerdem über ein optimiertes Kühlsystem zur effizienten RF-Energieerzeugung, das durch kontinuierliche Wasserkühlung arbeitet, wenn der Hautwiderstand zunimmt.

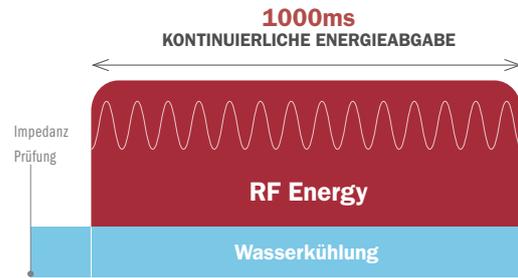

SCHNELLE UND KOMFORTABLE BEHANDLUNG

- Die kontinuierliche Wasserkühlung lindert Schmerzen bei ausgezeichneter Sicherheit und schützt die Epidermis direkt vor Verletzungen während der RF-Erzeugung.

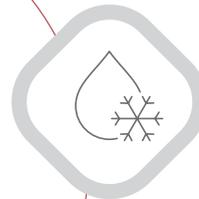

FÖRDERT DIE KOLLAGENREGENERATION IN DER PAPILLÄREN DERMIS



- Die Hydra-Wasserkühlung beeinflusst die Wärmeenergiebildung in der Papillarschicht der Dermis und erzeugt sofortige Effekte direkt nach der Behandlung.

MEHR KOMFORT FÜR DEN ARZT - BESSERE ERGEBNISSE FÜR DEN PATIENTEN

1

OPTIMALER WIEDERHOLUNGS- MODUS

- Der Wiederholmodus ermöglicht eine schnellere Behandlung.
- Die verdeckte Kante und die gewölbte Spitzenoberfläche von VOLNEWMER erzeugen einen radialen Energiefluss der Elektroden und führen zu einer überlappenden Wärmeenergie-Bildung, um wiederholte, überlappende Verfahren zu optimieren.

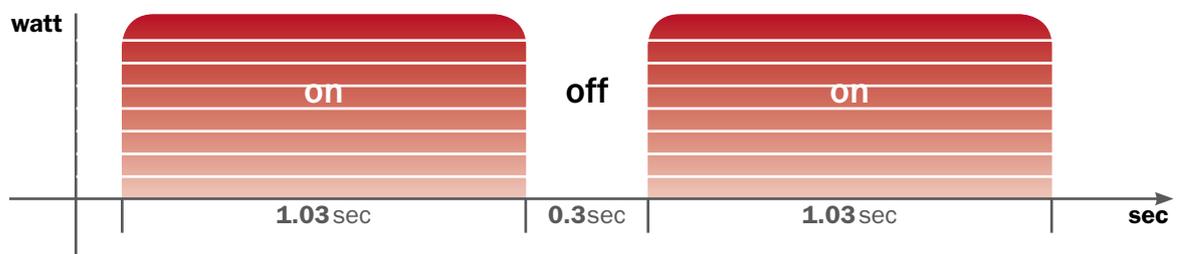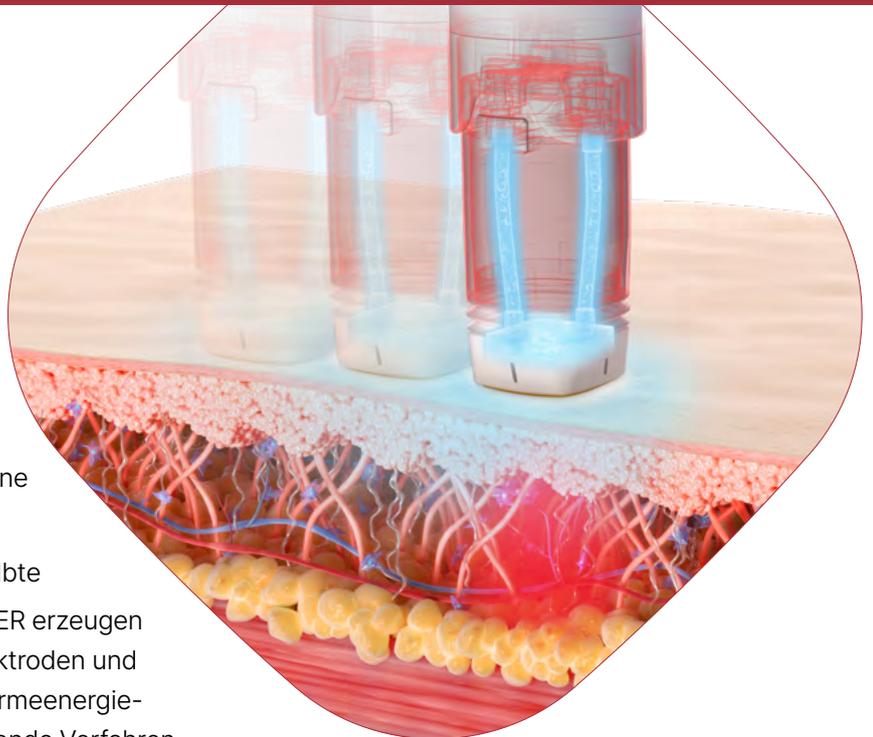

2

2 HANDSTÜCKE

Ermöglicht eine schnelle und einfache Behandlung. Die beiden Handstücke reduzieren den Aufwand beim Wechseln der Spitzen während der Behandlung.






Zwei Handstücke

3

FLEXIBLER UND LEICHT NEIGBARER APPLIKATOR

Der Applikatorkopf von VOLNEWMER lässt sich in alle Richtungen neigen und passt sich so perfekt der Kontur des Behandlungsbereichs an – für einen stabilen Hautkontakt und optimale Behandlungsergebnisse.

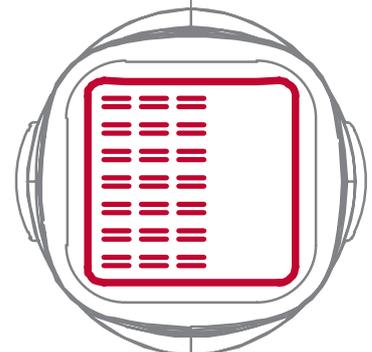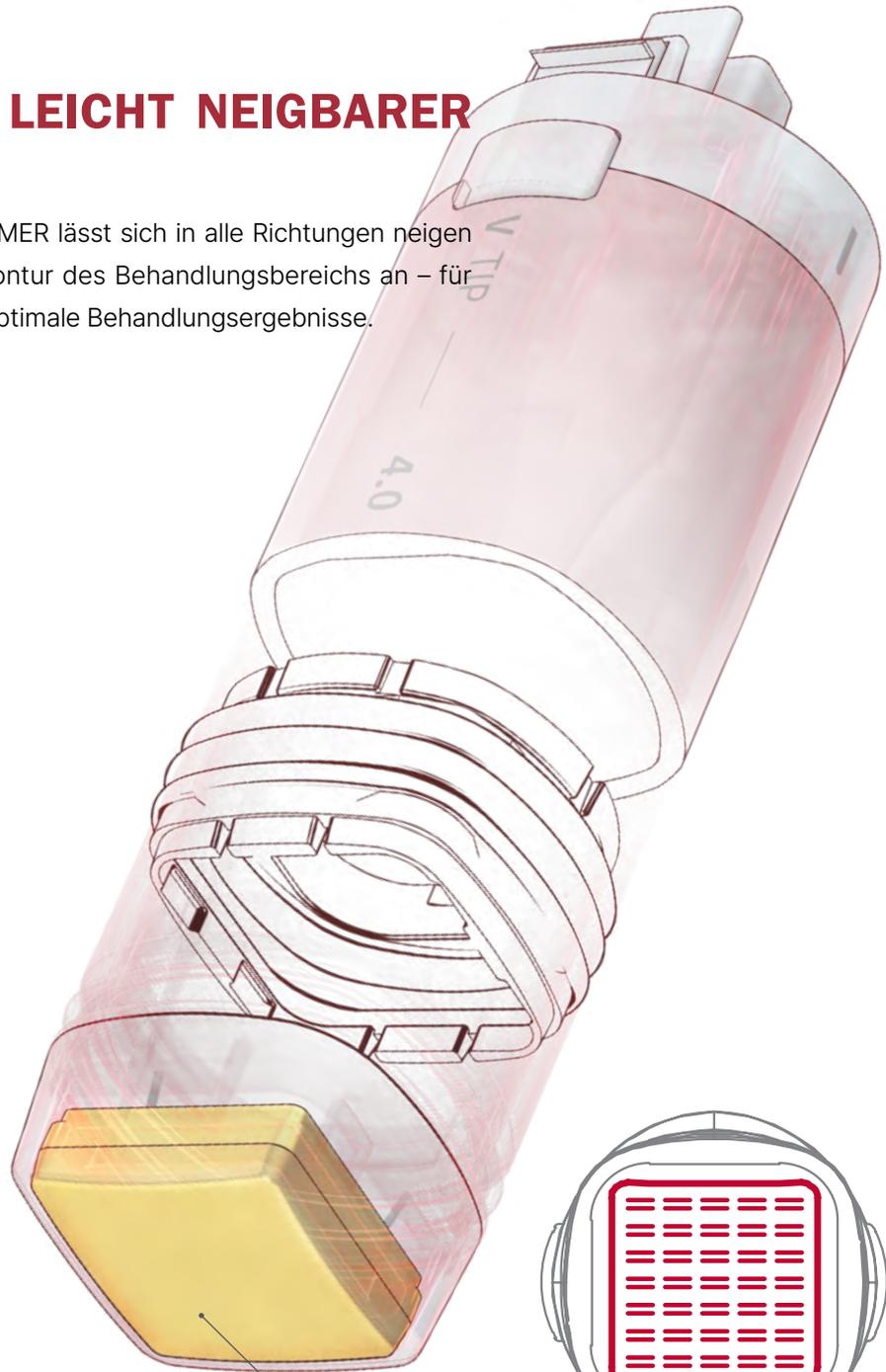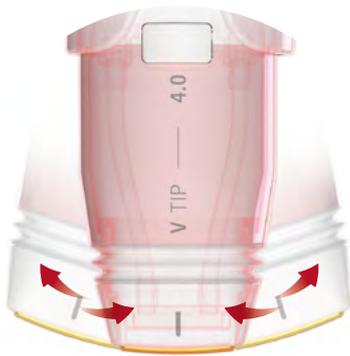**4**

ECHZEIT-SYSTEM ZUR HAUTWIDERSTANDSMESSUNG

Volnewmer erkennt Änderungen des Widerstandswerts über die gesamte Spitze während eines Impulses und verfügt über eine Technologie, die die RF-Erzeugung stoppt, wenn auch nur ein Teil der Spitze den Hautkontakt verliert, um Nebenwirkungen zu vermeiden.

5




KEINE ZEITBEGRENZUNG

Der Behandlungsplan sollte nach dem Ermessen des Arztes festgelegt werden. Da es keine zeitliche Begrenzung für Verbrauchsmaterialien gibt, können Ärzte bis zu vier verschiedene Arten von Applikatoren während einer Behandlung kombinieren.

6

4 APPLIKATORENTYPEN ZUR BEHANDLUNG VERSCHIEDENER BEREICHE


Die verschiedenen Applikatoren von Volnewmer sind so konzipiert, dass eine individuell anpassbare Behandlung von Gesicht und Körper möglich ist.

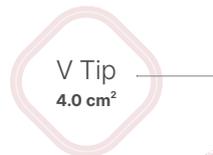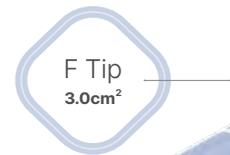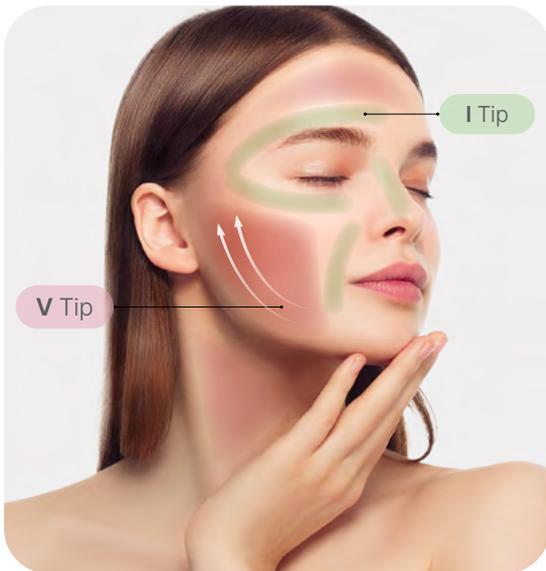

Es stehen verschiedene Verfahrensdesigns zur Verfügung, wie z. B. Gesicht (Augen und Stirn), Körper und Dekolleté.



ARME

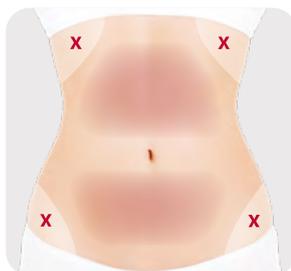

BAUCH



KNIE & OBERSCHENKEL



GESÄSS

KLINISCHE ERGEBNISSE

VORDERANSICHT



VOR DER BEHANDLUNG



NACH 8 WOCHEN




NACH 12 WOCHEN


VOLUMENÄNDERUNG



VOR DER BEHANDLUNG

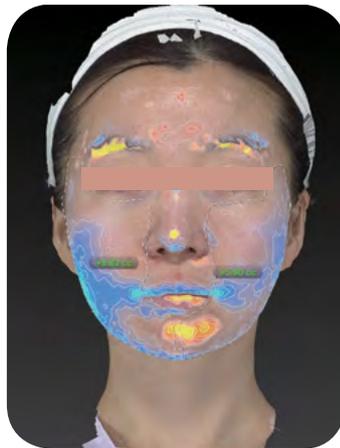

NACH 8 WOCHEN

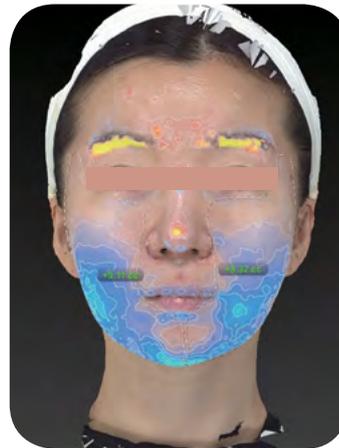


NACH 12 WOCHEN

*Die Volumenanalyse zeigt eine sichtbare Verbesserung: Bereits 3 Monate nach der Behandlung konnte ein Volumenzuwachs von insgesamt 17,43 cc erzielt werden

VEKTORÄNDERUNG



VOR DER BEHANDLUNG

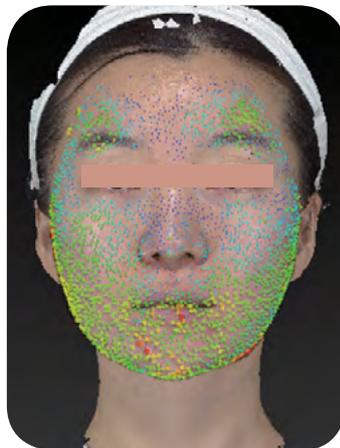

NACH 8 WOCHEN




NACH 12 WOCHEN

*Vektoränderung visualisiert den Grad des Hautliftings anhand von Pfeilen


KLINISCHE ERGEBNISSE

VOLUMENEFFEKT

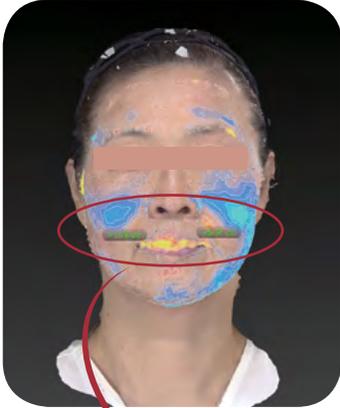


VOR DER BEHANDLUNG

NACH 8 WOCHEN

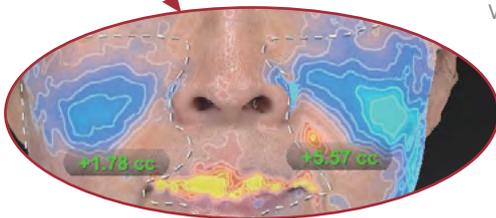

* Volumenänderung visualisiert quantitative Analyse der Volumenänderungen

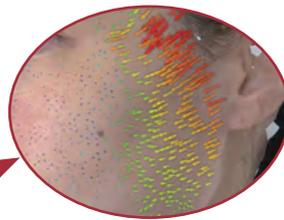

*Vektoränderung visualisiert den Grad des Hautliftings anhand von Pfeilen

LIFTING-EFFEKT



NACH 8 WOCHEN

NACH 12 WOCHEN

STRAFFUNG UND FALTENREDUKTION



VORHER

NACH 12 WOCHEN

VORHER

NACH 12 WOCHEN

KLINISCHE ERGEBNISSE


HAUTANALYSE



VOR DER BEHANDLUNG



NACH 12 WOCHEN

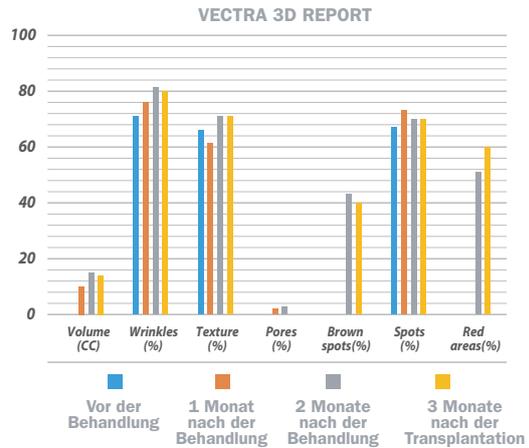


HAUTANALYSE



VOR DER BEHANDLUNG




NACH 12 WOCHEN

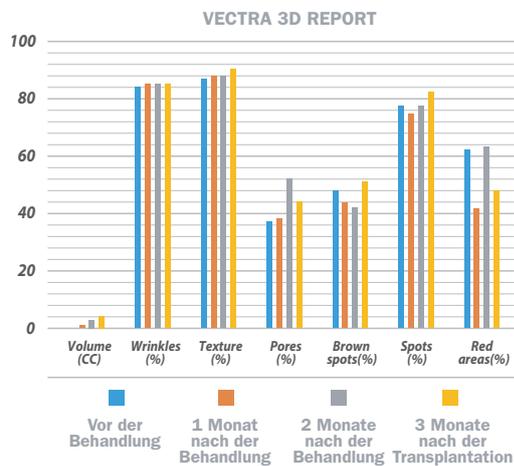


* Ein höherer Prozentsatz bedeutet eine stärkere Hautverbesserung in jeder Kategorie.

VECTRA 3D-KAMERA-BERICHT

PROZENTSATZ DER PERSONEN, DEREN HAUT SICH IN JEDER KATEGORIE VERBESSERT

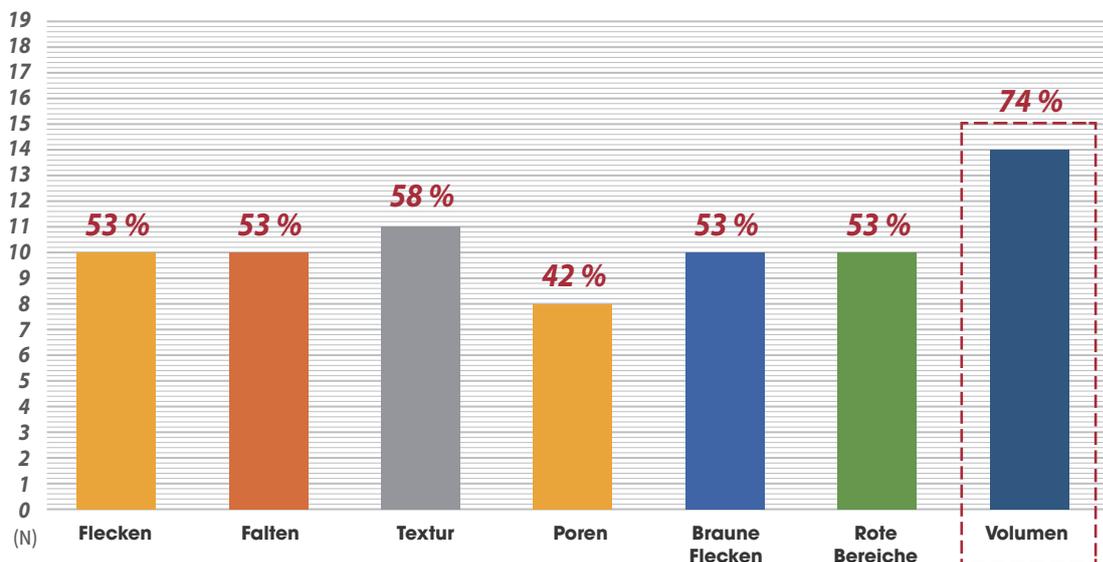

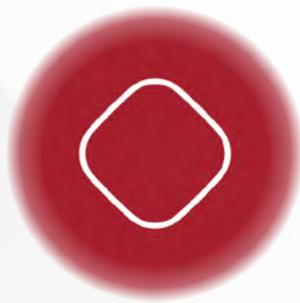

VOLNEWMER®

6.78MHz Monopolar RF

CDPSWISS
CLINICAL DISTRIBUTION PARTNER

Sagistrasse 8B
8910 Affoltern am Albis
Schweiz

T: +41 43 538 57 45
F: +41 43 538 57 73

info@cdpswiss.com
www.cdpswiss.com
